




Pajisja HEMAway

Pajisja perbehet nga nje pjese e vetme, e cila perfshin ndenjese tone unike, eshte per perdorim shtepiak ose gjate udhetimeve. Ndenjesja eshte e bere nga material i forte dhe eshte shume e lehte per ta mbajtur paster. Eshte e pershtatshme per cdo WC. Perfekte per njerezit ne levizje.

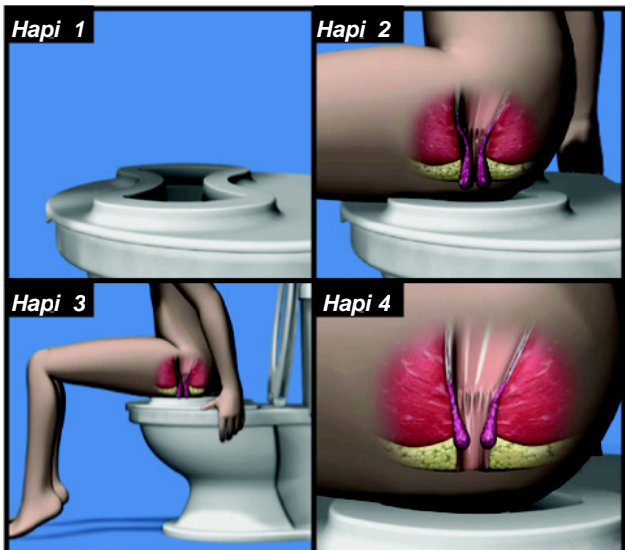

Per nje perdorim te duhur:

Hapi i 1: Vendosni pajisjen mbi WC.

Hapi i 2: Uluni mbi ndenjese duke vendosur ne qendren e zones se hapur hemorroidet.

Hapi i 3: Ushtroni presion duhe ngritur thembrat e kembeve dhe butesisht shtyni anet e ndenjese se WC.

Hapi i 4: Hemorroidet kthehen ne gjendje normale ne pak minuta, dhe do te ndjeni lehtesim te menjehershem.

Si funksionon?

Pajisja per hemorroidet HemAway vendoset mbi WC. Sekretet eshte dizajni ekskluziv i shpikjes qe perdor peshen trupore te njeriut per te krijuar vakum te brendeshem ne rektum. Vakumi mundeson edhe hemorroidet me te avancuara te terhiqen brenda ne pozicionin e tyre normal, duke sjell lehtesim te dhimbjeve. Pajisja lehteson simptomat duke perdorur thjesht fizikun e trupit i cili vete, mundeson terheqjen brenda ne menyre natyrale te hemorroideve.

Deshmues

Dan shofer kamioni nga Minnesota

Me besoni, pajisja HemAway vertet funksionon! Une rri ulur shume ore ne dite dhe asgje nga ato qe kam provuar me pare nuk me ndalonin dhimbjet dhe shqetesimin qe me vinin nga hemorroidet derisa perdora HemAway. Eshte e thjeshte per tu perdorur, private dhe e pershtatshme per cdo WC, keshtu qe eshte perfekte per stillin tim te jeteses.

Sara, nënë e tre fëmijëve nga Kalifornia

Pas cdo lindje, une jam perballur me shqetesimin e hemorroideve qe me ri-perseriteshin. Kirurgjia nuk me ndihmoj aspak. Kur mbeta me barre me femijen e trete kisha me shume frike nga dhimbjet e hemorroideve sesa nga ato te lindjes. E vetmja gje qe me ndihmoi te kaloja dhimbjen, ishte pajisja HemAway. Eshte e pabesueshme! Une gjeta lehtesim te menjehershem keshtu qe isha aty per familjen time dhe ju ktheva jetes normale!

Dr. Ronald Discenza, mjek nga New York

Aplikimet klinike te pajisjes HemAway kane qene shume te suksesshme dhe akoma me shume lehtesimi i pacienteve! Une rekomandoj se tepermi kete produkt qe perfaqeson menyren e re te trajtimit ne luften kunder semundjes se hemorroideve.



O.E.S Distrimed.shpk

Tirana – Albania

Tel: +3554 22 70 660

Fax: +35542270307

web :www.oesdistrimed.com/hemaway.html

e-mail: hemaway@oesdistrimed.com

DHIMBJE DHE SHTRENGIM NGA HEMORROIDET?

LEHTESIMI I MENJEHERSHEM
ESHTE VETEM KJO PAJISJE



Thjeshte - Lehtesim pa dhimbje

FDA – E paster, e sigurt, e thjeshte, natyrale, jo - invazive





HemAway

Thjeshte
Naturale

Private Jo-invazive E sigurte

Ju thoni "mjaft" dhimbjeve - HemAway® eshte me ne fund ketu . Pajisja Hemaway eshte krijuar per t'ju siguruar lehtesim te shpejte nga dhimbjet e hemorroideve. Pajisja Hemaway eshte nje mundesi trajtimi jo-invazive, e lehte per tu perdorur, pa dhimbje dhe diskrete. Pajisja jone nuk ka agjent demtues per trajtimin e hemorroideve ose majasellit.

Tashme nuk je vetem - HemAway mund t'ju ndihmoje. Afersisht 50% e popullsisë ne bote vuan nga nje shkalle e hemorroideve pas moshes 50 vjeç. Hemorroidet shfaqen kryesisht te grate me bare dhe tek ato gra mbi 30 vjeç. Megjithate, ato mund te shfaqen tek te gjithë, duhe shkakuar dhimbje dhe duke ndryshuar menyren tuaj te jeteses.

HemAway mund t'ju ndaloje dhimbjen. Hemorroidet mund te shkaktojnë gjakrrjedhje, te kruara dhe dhimbje te medha. Pajisja Hemaway mund tju siguroje lehtesim te menjehershëm.



E Thjeshte

Shpikja unike qe po pret te behet me patente eshte shume e thjeshte per tu perdorur. Pajisja jone perdor peshen tuaj trupore bashke me gravitetin qe mundeson hemorroidet te kthehen ne pozicionin e tyre normal brenda trupit. Nuk ka neoje qe te perdorni pomada, fasho ose pajisje te tjera te komplikuara. Me pajisjen Hemaway, ju do te kurseni para dhe kohe per vizitat mjekesore, nderhyrje kirurgjikale, ose per produkte te paefektshme.



Pa Dhimbje

Pajisja Hemaway eshte nje trajtim pa dhimbje qe do t'ju heqi agonine e daljes se hemorroideve interne per pak minuta. Pajisja Hemaway eshte pa agjent demtues per lekuren, trajtim jo-invaziv per lehtesimin e dhimbjes dhe presionit te hemorroideve. Nuk ju duhen me fashot torturuese dhe vizitat e sikletshme te mjeku, dhe s'ka me nevojë per prekje johigjenike dhe te pakendeshme per ju. Mund te shmangni nderhyrje kirurgjikale qe rezultojne ne kovaleshence te gjate dhe/ ose efekte te tjera anesore. Me Hemaway, perjetoni lirine dhe lehtesimin nga dhimbjet ne privatesine e shtepise suaj.



Lehtesim

Klientet tane qe perdorin Hemaway mund tju sigurojne qe cilesia e jetes se tyre eshte permiresuar. Ndryshe nga produktet e tjera per hemorroidet qe e maskojne ose mpijne dhimbjen tuaj, pajisja Hemaway permireson gjendjen tuaj duke i terhequr ato butesisht ne rektum. Kjo ju jep lehtesim te menjehershëm nga dhimbja dhe ënjtja. Pajisja Hemaway eshte pergjigjia e vuajtjes suaj.



Nga Dr. John M. Maurello

Krijuesi i pajisjes inovative qe pert te patentohet dhe bashke-projektuesi i pajisjes Hemaway

Une jam nje mjek qe kam vuajtur per vite me radhe nga dhimbjet dhe shqetesimet qe sjellin hemorroidet. Si ju edhe une i kam provuar te gjitha:

Pomada, kompresa dhe pajisje te ndryshme. Kam duruar vizitat dhe ekzaminimet e sikletshme tek mjeku. U jam nenshtuar procedurave kirurgjikale qe japin nje lehtesim minimal ose nuk japin lehtesim aspak. Mbeta shume keq, pasi edhe pas harxhimit te gjithë atyre parave nuk gjeta sherim. Nevoja eshte nena e shpikjeve. Mua me duhej te gjeja nje mundesi qe hemorroidet e mia te ktheheshin ne pozicionin e tyre normal ne rektum.

Meqe nga eksperienca ime e dija qe te perdorje gishtat dhe produkte te tjera nuk funksiononte dhe une fillova te shihja nga ana fizike dhe fiziologjike trupin. Pas shume perpjekjesh zbulova se krijini i vakumit natyral ne rektum kthente hemorroidet ne pozicionin e tyre normal. Fizika ketu eshte e ngjashme me pasten e dhembeve qe futet perseri ne tubet nese e shtypim nga anet. Ky koncept me shty mua te krijoj pajisjen Hemaway. Nuk keni pse te vuani me. Hemaway eshte ketu t'ju çliroje ju nga dhimbja e hemorroideve.